



EQUIPOD®

# KORBAND

GERÄTEHANDBUCH

Das EquiPod KorBand wurde konzipiert zur Behandlung des Rückens und des umliegenden Gewebes.

#### **Inhalt der Box**

- 1 x EquiPod KorBand
- 1 x Kabel für Zubehör
- 1 x Benutzerhandbuch

#### **Zusätzliches Systemzubehör**

- EquiPod Leitfähiges Gel
- EquiPod KorWrap
- EquiPod Elektroden-Pads



Suchen Sie für weitere Informationen einschließlich: Geräte-Kurzanleitung, Anleitung, FAQ's und mehr.



EquiPod ist ein komplettes Therapiesystem für Ihr Pferd, das entwickelt wurde, um den Heilungsprozess bei einer Vielzahl von Verletzungen und schmerzhaften Zuständen durch eine fortschrittliche Form des transkutanen Mikrostroms zu unterstützen und zu verbessern.

Der Mikrostrom arbeitet unterhalb der sensorischen Schwelle, ist absolut schmerzfrei, nicht-invasiv und wird von Pferden gut vertragen.

## EquiPod-Behandlungsprogramme:



### **Therapie & Regeneration**

Unterstützt die Regeneration und fördert somit die Heilung unzähliger Wunden und Verletzungen.



### **Schmerztherapie**




Nicht-pharmakologische Behandlung von chronischen und akuten Schmerzen.



### **Pflege & Wohlbefinden**


Ziel ist die Förderung der körperlichen Gesundheit und des funktionellen Wohlbefindens der Gelenke und Muskeln.

- 1 Druckknöpfe
- 2 Gerätetasche
- 3 Abdeckung des Leitungskabels
- 4 Geräteanschluss
- 5 Zuleitungskabel für Zubehör
- 6 Druckknopf-Steckverbinder

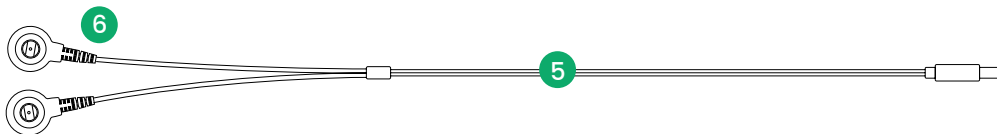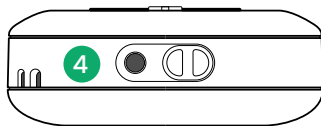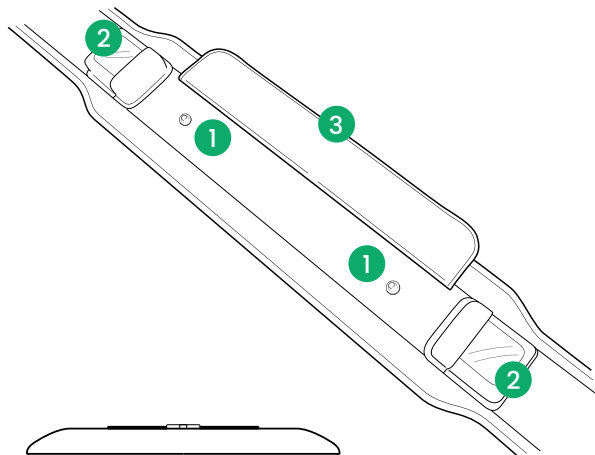


## ZUBEHÖRKABEL ANSCHLIESSEN

1. Klappen Sie die Klettverschlussabdeckung des Anschlusskabels zurück. Befestigen Sie den Zubehör-Leitungskabel, indem Sie die Druckknopfverbinder auf die beiden Druckknöpfe am KorBand drücken.

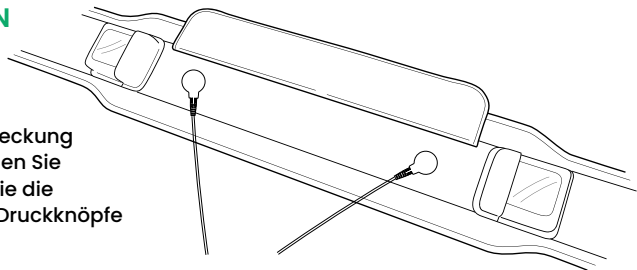


2. Führen Sie das Zubehörkabel zurück in die Gerätetasche und schließen Sie die Klettverschlussabdeckung des Anschlusskabels.

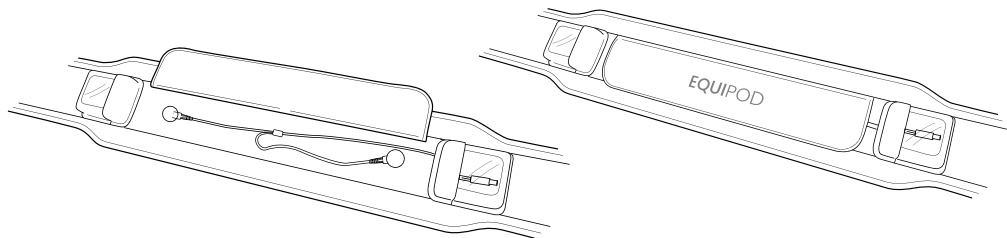


## KONTAKTGEL AUFTRAGEN

**3.** Tragen Sie eine dünne Schicht Kontaktgel auf jedes der integrierten leitfähigen Pads auf.

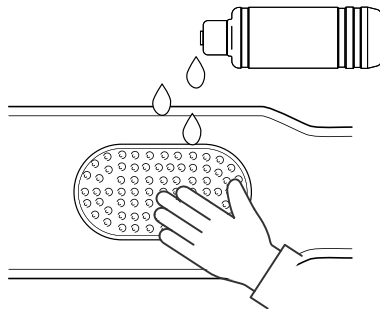


**4.** Tragen Sie eine kleine Menge Kontaktgel auf die für die Pads vorgesehene Stelle des Fells auf. Arbeiten Sie das Gel in kreisenden Bewegungen sanft in das Fell ein, bis es die Haut erreicht hat.

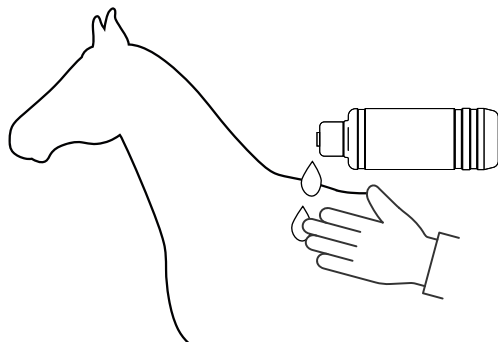


## DAS KORBAND ANPASSEN

5. Legen Sie das schwarze Ende des Befestigungsbandes unter die Sicherheitsklappe, wobei die Klettverschluss nach unten zeigen muss.

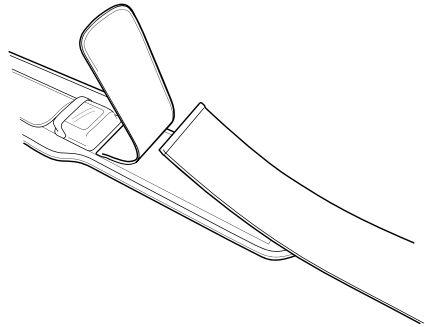

6. Legen Sie das KorBand über den Rücken des Pferdes und befestigen Sie es, indem Sie das grüne Ende des Befestigungsbandes durch den Metallsteg führen, bevor Sie das Klettband umklappen.

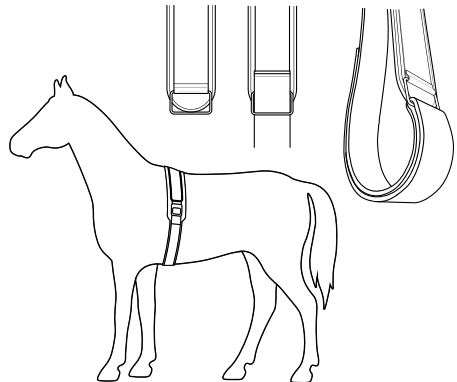


## GERÄT ANSCHLIESSEN

**7a.** Verbinden Sie das Kabel des Zubehörs mit dem Anschluss des EquiPod-Geräts.


**7b.** Schalten Sie das Gerät EIN.

**7c.** Wählen und starten Sie ein Behandlungsprogramm über die EquiPod Mobile-App oder manuell über das Gerät.

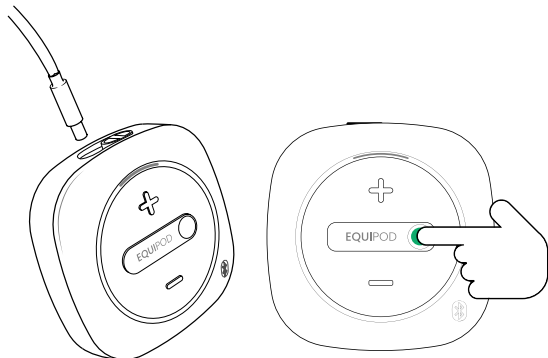

**8a.** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Behandlung läuft, indem Sie die EquiPod-App oder die blinkenden LEDs am Gerät überprüfen.


**8b.** Schieben Sie den EquiPod in die Gerätetasche, sichern Sie ihn und schließen Sie die Tasche.

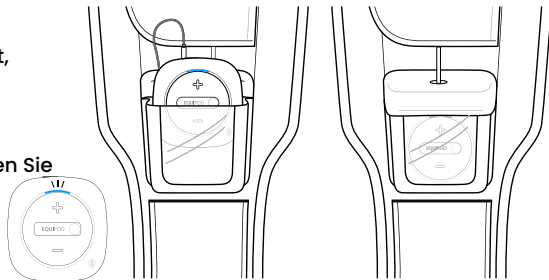




## NACH DEM GEBRAUCH

9. Nach Abschluss der Behandlung nehmen Sie das KorBand ab und wischen mit einem feuchten Tuch alle Reste des Leitgels von den integrierten leitfähigen Pads ab.

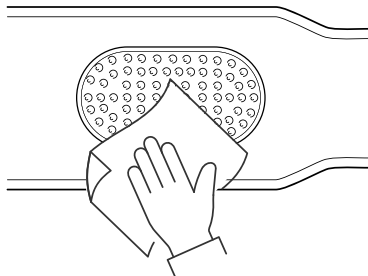

10. Wischen Sie die Reste des Leitgels mit einem feuchten Tuch vom Fell ab.

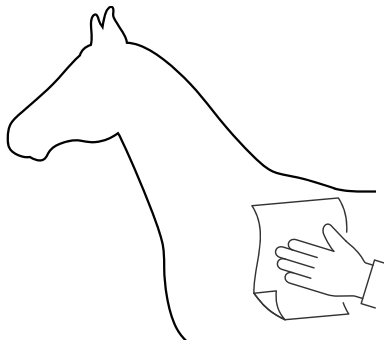


## VERWENDUNG VON SELBSTKLEBENDEN ELEKTRODENPADS


Klebelektroden-Pads werden zur gezielten Behandlung von Wunden, Weichteilbereichen oder Gelenken verwendet. Die Pads sollten auf beiden Seiten des betroffenen Bereichs angebracht werden. Um eine gute Verbindung zu gewährleisten, kann es notwendig sein, das Fell an den Stellen, an denen die Pads angebracht werden, zu kürzen oder zu beschneiden.

1. Befestigen Sie das Gurtzubehör am Pferd und achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu fest angezogen sind. (Siehe Schritt 5)
2. Tragen Sie eine kleine Menge EquiPod-Kontaktgel auf das Fell in dem für die Pads vorgesehenen Bereich auf. Führen Sie Ihren Finger sanft in kreisenden Bewegungen, bis das Gel die Haut erreicht hat.
3. Tragen Sie eine kleine Menge Kontaktgel in der Mitte jedes Klebepads auf. Halten Sie den Rest der Oberfläche des Klebepads frei von leitfähigem Gel, um die Klebefähigkeit zu erhalten.
4. Legen Sie die Klebelektrodenpads auf beide Seiten des Behandlungsbereichs, wo das Gel auf das Fell aufgetragen wurde.
5. Verbinden Sie die magnetischen Anschlüsse am Pad-Leitungsdraht mit jedem der Klebelektroden-Pads. (x2)
6. Stecken Sie den Elektrodenleitungsdraht in den Anschluss des EquiPod-Geräts.
7. Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie das Behandlungsprogramm.
8. Legen Sie das Gerät in die Halterung am KorBand (siehe Schritt 4).

2.

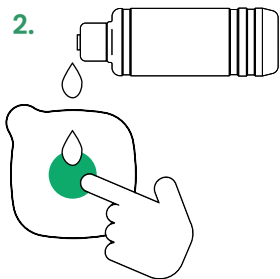

5.

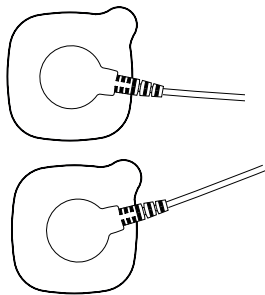

## SICHERHEIT & VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bringen Sie die Elektrodenpads oder Zubehörpads NICHT auf verletzten Hautstellen an.
- Verwenden Sie es NICHT als Ersatz für eine tierärztliche Behandlung.
- Verwenden Sie es NICHT länger als 3 Stunden in einer ununterbrochenen Behandlungssitzung und entfernen Sie es sofort nach dem Gebrauch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktflächen der Elektroden, das Fell und die Haut vor der Anwendung sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sind.
- Waschen und trocknen Sie nach jeder Behandlung den Bereich, auf den das leitfähige Gel aufgetragen wurde, vorsichtig ab.
- Verwenden Sie EquiPod-Kontaktgel nur in Verbindung mit dem EquiPod-System
- Es wird empfohlen, Pferde während der Verwendung des Geräts zu überwachen.
- Nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt.

## KONTAKT-INFORMATIONEN

**[www.equipod.co.uk](http://www.equipod.co.uk) - [info@equipod.com](mailto:info@equipod.com)**

Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, Vereinigtes Königreich  
oder Händler in Ihrem Kaufland.

TM und © 2022 NuroKor Animal Healthtech. Alle Rechte vorbehalten. EquiPod® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von NuroKor Ltd. Eingetragen im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. Entwickelt von NuroKor im Vereinigten Königreich.



EQUIPOD.

KORBAND



Werden Sie Mitglied der EquiPod-Gemeinschaft

**AH**  
Animal HealthTech  
HorseKor