



EQUIPOD®

KORWRAP

GERÄTEHANDBUCH

Der EquiPod KorWrap wurde konzipiert zur Behandlung der Beine und des umliegenden Gewebes.

Inhalt der Box

- 1 x EquiPod KorWrap
- 1 x Zuleitungskabel für Zubehör
- 1 x Gebrauchsanweisung

Zusätzliches Systemzubehör

- EquiPod leitfähiges Gel
- EquiPod KorBand
- EquiPod Elektroden-Pads



Suchen Sie für weitere Informationen einschließlich: Geräte-Schnellstart Anleitung, FAQ's und mehr.



EquiPod ist ein komplettes Therapiesystem für Ihr Pferd, das entwickelt wurde, um den Heilungsprozess bei einer Vielzahl von Verletzungen und schmerzhaften Zuständen durch eine fortschrittliche Form des transkutanen Mikrostroms zu unterstützen und zu verbessern.

Der Mikrostrom arbeitet unterhalb der sensorischen Schwelle, ist absolut schmerzfrei, nicht-invasiv und wird von Pferden gut vertragen.

EquiPod-Behandlungsprogramme:



Therapie & Regeneration

Unterstützt die Regeneration und fördert somit die Heilung unzähliger Wunden und Verletzungen.



Schmerztherapie



Nicht-pharmakologische Behandlung von chronischen und akuten Schmerzen.



Pflege & Wohlbefinden


Ziel ist die Förderung der körperlichen Gesundheit und des funktionellen Wohlbefindens der Gelenke und Muskeln.

- 1 Druckknöpfe
- 2 Gerätetasche
- 3 Abdeckung des Leitungsdrahtes
- 4 Zubehör-Leitungskabel
- 5 Druckknopf-Verbinder
- 6 Geräteanschluss

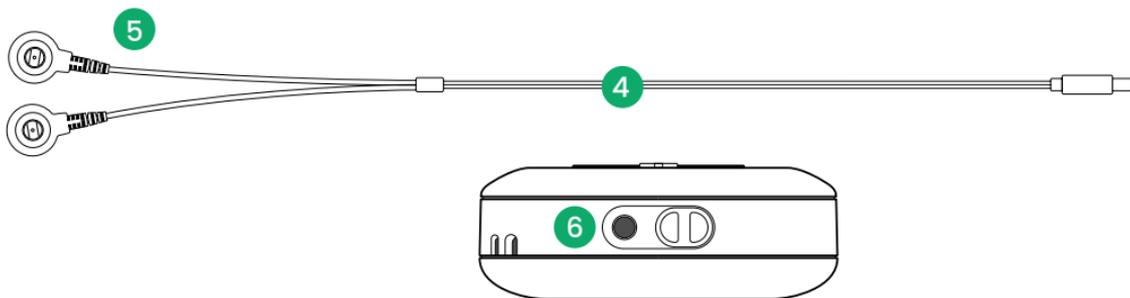
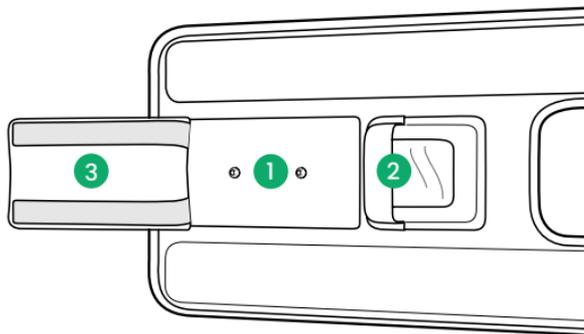


ZUBEHÖRKABEL ANSCHLIESSEN

1. Klappen Sie die Klettverschlussabdeckung des Anschlusskabels zurück. Befestigen Sie das Zubehörkabel, indem Sie die Druckknopfverbinder auf die beiden Druckknöpfe an der KorWrap drücken.

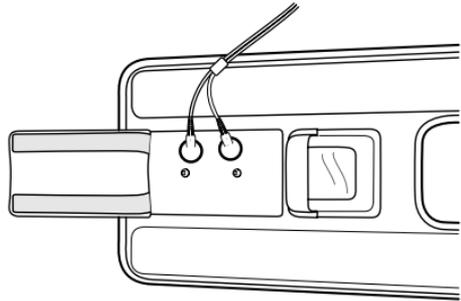


2. Legen Sie das Kabel für das Zubehör zurück in die Gerätetasche und schließen Sie die Klettverschlussabdeckung des Anschlusskabels.

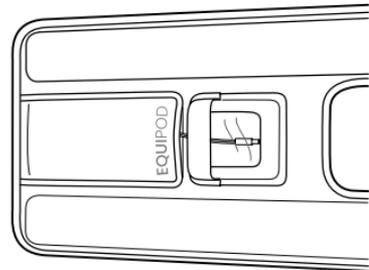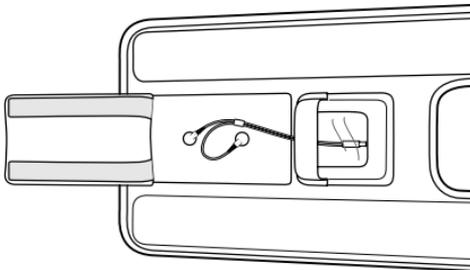


KONTAKTGEL AUFBRINGEN

3. Tragen Sie eine dünne Schicht leitfähiges Gel auf jedes der integrierten leitfähigen Pads auf.

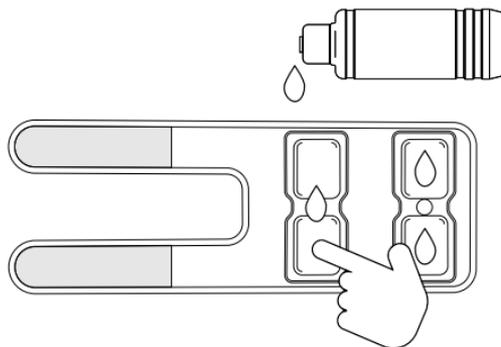


4. Tragen Sie eine kleine Menge Kontaktgel auf die für die Pads vorgesehene Stelle des Fells auf. Arbeiten Sie das Gel in kreisenden Bewegungen sanft in das Fell ein, bis es die Haut erreicht hat.

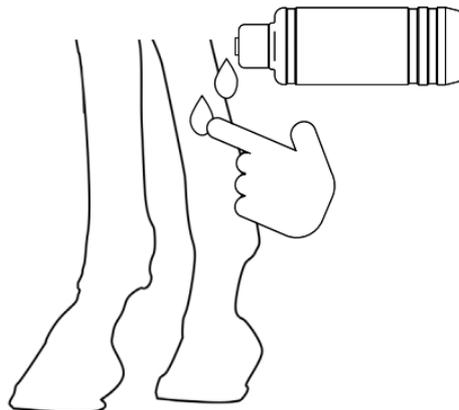

KORWRAP ANBRINGEN

5. Der EquiPod KorWrap wurde so konzipiert, dass er an jedem Bein des Pferdes verwendet werden kann. Wickeln Sie den EquiPod KorWrap vorsichtig um das Bein und achten Sie darauf, dass das Gerät an der Außenseite des Beins bleibt und die Riemen in ihrer endgültigen Position nach hinten zeigen.

Ziehen Sie nicht zu fest an. Es ist nur ein leichter Druck erforderlich, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.

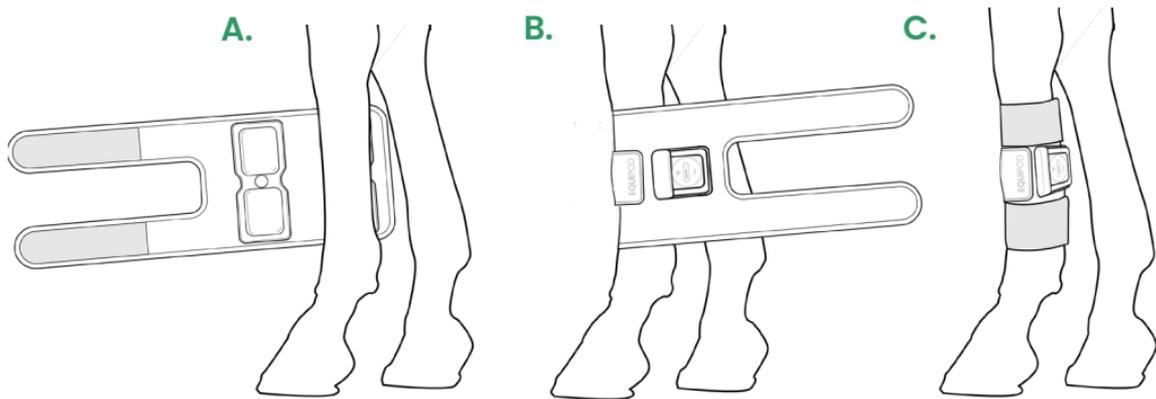


GERÄT ANSCHLIESSEN

7a. Verbinden Sie das Kabel des Zubehörs mit dem Anschluss des EquiPod-Geräts.


7b. Schalten Sie das Gerät EIN

7c. Wählen und starten Sie ein Behandlungsprogramm über die EquiPod Mobile- App oder manuell über das Gerät.

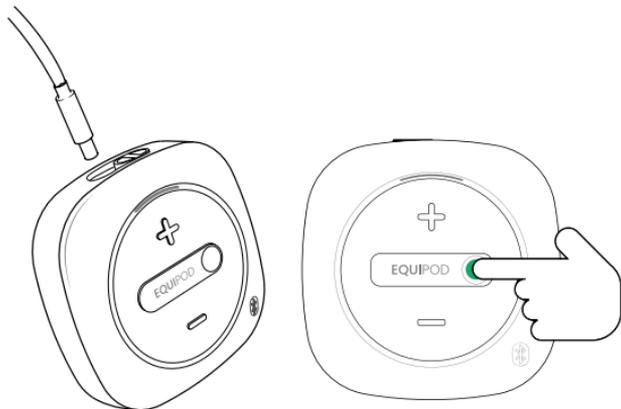


8a. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Behandlung läuft, indem Sie die EquiPod-App oder die blinkenden LEDs auf dem Gerät überprüfen.

8b. Schieben Sie den EquiPod in die Gerätetasche, befestigen Sie ihn und schließen Sie die Tasche.

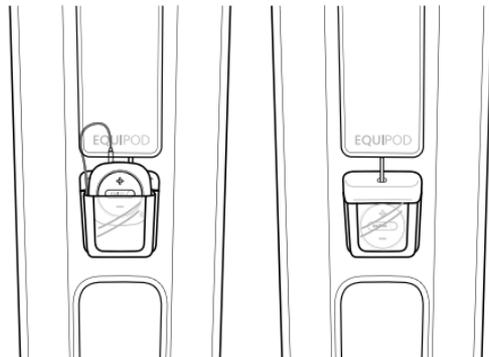

NACH DEM GEBRAUCH

9. Nach Abschluss der Behandlung entfernen Sie den KorWrap und wischen mit einem feuchten Tuch die Reste des Leitgels von den integrierten leitfähigen Pads ab.

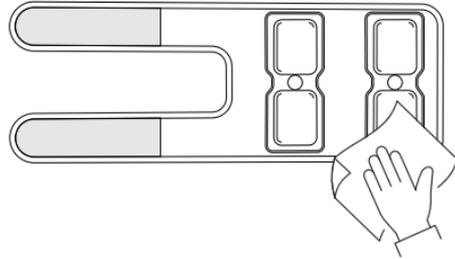



10. Wischen Sie die Reste des Kontaktgels mit einem feuchten Tuch vom Fell ab.



VERWENDUNG VON SELBSTKLEBENDEN PADS

Klebelektroden-Pads werden zur gezielten Behandlung von Wunden, Muskelgruppen oder Gelenken verwendet. Die Pads sollten auf beiden Seiten des betroffenen Bereichs angebracht werden. Um eine gute Verbindung zu gewährleisten, kann es notwendig sein, das Fell an den Stellen, an denen die Pads angebracht werden, zu kürzen oder zu scheren.

1. Befestigen Sie das Gurtzubehör am Pferd und achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu fest angezogen sind. (Siehe Schritt 5)
2. Tragen Sie eine kleine Menge EquiPod-Kontaktgel auf das Fell in dem für die Pads vorgesehenen Bereich auf. Bewegen Sie Ihren Finger sanft in kreisenden Bewegungen, bis das Gel die Haut erreicht hat.
3. Tragen Sie eine kleine Menge Kontaktgel auf die Mitte jedes Klebepads auf. Halten Sie den Rest der Oberfläche des Klebepads frei von Kontaktgel, um die Klebefähigkeit zu erhalten.
4. Platzieren Sie die selbstklebenden Elektrodenpads auf beiden Seiten der Behandlungsstelle, an der das Gel auf das Fell aufgetragen wurde
5. Verbinden Sie die magnetischen Anschlüsse am Pad-Leitungsdraht mit jedem der Klebelektroden-Pads. (x2)
6. Stecken Sie das Pad-Kabel in den Anschluss des EquiPod-Geräts.
7. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie ein Behandlungsprogramm.
8. Legen Sie das Gerät in die Halterung am KorBand (siehe Schritt 4).

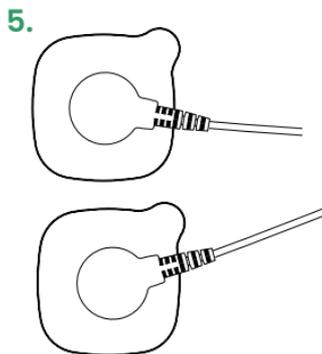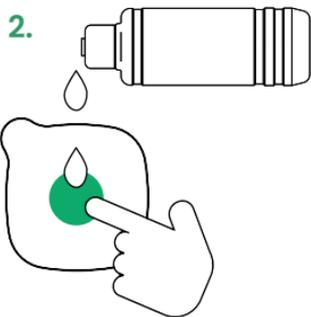

SICHERHEIT & VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bringen Sie die Elektrodenpads oder Zubehörpads NICHT auf verletzten Hautstellen an.
- Verwenden Sie es NICHT als Ersatz für eine tierärztliche Behandlung.
- Verwenden Sie es NICHT länger als 3 Stunden in einer ununterbrochenen Behandlungssitzung und entfernen Sie es sofort nach Gebrauch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktflächen der Elektroden, das Fell und die Haut vor der Anwendung sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sind.
- Waschen und trocknen Sie nach jeder Behandlung den Bereich, auf den das leitfähige Gel aufgetragen wurde, vorsichtig ab.
- Verwenden Sie EquiPod-Kontakgel nur in Verbindung mit dem EquiPod-System.
- Es wird empfohlen, Pferde während der Anwendung des Geräts zu überwachen.
- Nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt.

KONTAKT-INFORMATIONEN

www.equipod.co.uk - info@equipod.com

Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, Vereinigtes Königreich
oder Händler in Ihrem Kaufland.

TM und © 2022 NuroKor Animal Healthtech. Alle Rechte vorbehalten. EquiPod® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von NuroKor Ltd. Eingetragen im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. Entwickelt von NuroKor im Vereinigten Königreich.



EQUIPOD.

KORWRAP



Werden Sie Mitglied der EquiPod-Gemeinschaft

AH
Animal HealthTech
HorseKor